

نحوه نگهداری و تمیز نمودن دستگاه:

- ۱- دستگاه را همیشه در کیف مربوطه و دردمای اتاق نگه داری نماید.
- ۲- بدنه دستگاه را در صورت آلوده شدن می توانید با پارچه نرم و محلول ضد عفونی رقیق شده تمیز کنید. دقت نماید هیچگاه محل تست روی دستگاه را با محلول ضد عفونی نماید.
- ۳- محل تست را در صورت آلوده شدن (کثیف شدن) تنها با گوش پاک کن مرطوب شده توسط آب گرم تمیز و سپس خشک نماید.
- ۴- هیچگاه قطعات دستگاه را باز نکنید.
- ۵- دستگاه را در معرض نور مستقیم خورشید و یا محلی که رطوبت زیاد دارد نگهداری نکنید.
- ۶- دستگاه را در محلی که گرد و غبار وجود دارد نگهداری نکنید.
- ۷- از دستگاه در کنار وسایل الکترونیکی (موبایل و) استفاده نکنید.
- ۸- مراقبت نماید دستگاه به زمین نیافتد.
- ۹- دستگاه را در محلی که مواد شیمیایی وجود دارد نگهداری نکنید.

عیب یابی (پیغامای خطا)

پیام	دلیل مشکل یا عیب آن	راه حل و یاعملیات لازم برای رفع مشکل
Er1	این پیام وقتی حاصل می شود که دستگاه دارای مشکل سخت افزاری است	باتریها را خارج و دوباره در دستگاه قرار دهید در صورت مشاهده مجدد پیغام خطا با شرکت کامیاب طب مداوا تماس حاصل نمایید.
Er2	این پیام زمانی نمایان می شود که نوار تست ممکن است آلوده باشد و یا قبلاً مصرف شده باشد	لطفاً نوار تست جدیدی وارد کنید و عملیات را مجدداً انجام دهید.
Er3	این پیام وقتی نمایان می شود که به مقدار کافی خون به نوار تست داده نشده باشد.	لطفاً آزمایش را با نوار جدید تکرار و به مقدار کافی نمونه خون روی نوار تست قرار دهید.
Er4	این پیام وقتی نمایش داده می شود که بر روی نوار هیچگونه نمونه خون و یا محلول کنترل قرار نگرفته باشد.	لطفاً نوار تست جدیدی وارد کنید و عملیات را مجدداً انجام دهید.

عیب یابی

<p>لطفاً نوار تست جدیدی را وارد کرده صبر کنید که علامت قطره خون روی صفحه چشمک بزنه وبعد نمونه را وارد کنید</p>	<p>این پیام وقتی نمایش داده می شود که نمونه خون را قبل از اینکه دستگاه علامت قطره خون را نمایش دهد وارد کرده اید</p>	<p>Er5</p>
<p>لطفاً یک نوار تست جدید وارد کنید و عملیات را مجدداً انجام دهید.</p>	<p>این پیام وقتی حاصل می شود که کد رنگی پشت نوار تست قند مخدوش شده باشد</p>	<p>Er6</p>
<p>راه حل و یا عملیات لازم برای رفع مشکل</p>	<p>دلیل مشکل یا عیب آن</p>	<p>پیام</p>
<p>لطفاً با نوار تست جدید دوباره عملیات را تکرار کنید واز اینکه نوار تست در جایگاه اصلی و درست خود قرار گرفته مطمئن شوید و در حال تست گیری نوار را تکان ندهید.</p>	<p>این پیام وقتی نمایش داده می شود که زمان آزمایش نوار تست را جا به جا کرده و یا از دستگاه خارج نموده اید.</p>	<p>Er7</p>
<p>لطفاً با نوار تست جدید ، دوباره عملیات را تکرار کنید اگر این مشکل دوباره بوجود آمد لطفاً با نمایندگی کامیاب طب مداوا تماس حاصل فرمایید.</p>	<p>نتیجه تست بالاتراز حد بوده است برای قند بیش تر از 600 my/dl TC: بیش تر از 400 my/dl TG: بیش تر از 600 my/dl HDL: بیش تر از 800 my/dl</p>	<p>H1</p>
<p>لطفاً با نوار تست جدید ، دوباره عملیات را تکرار کنید اگر این مشکل دوباره بوجود آمد لطفاً با نمایندگی کامیاب طب مداوا تماس حاصل فرمایید.</p>	<p>نتیجه تست پایین تر از حد بوده است . برای قند پایین تر از 20 my/dl TC: پایین تر از 100 my/dl TG: پایین تر از 70 my/dl HDL: پایین تر از 25 my/dl</p>	<p>LO</p>
<p>دستگاه را در دمای بین 30C - 40C (10C - 40C) برای تست TC و (10C - 40C) برای تست قند قرار داده وبعد از ده دقیقه تست را مجدداً تکرار کنید.</p>	<p>دمای محیط بیشتر از 30C در آزمایش TC بوده است . دمای محیط بیشتر از 104f (40C) در آزمایش قند بوده است.</p>	<p>H1 C</p>
<p>دستگاه را در دمای بین 30C - 40C (10C - 40C) برای تست TC و (10C - 40C)</p>	<p>دمای محیط کمتر از 18C در آزمایش TC بوده است.</p>	<p>LOC</p>

برای تست قند قرار داده و بعد از ده دقیقه تست را مجدداً تکرار کنید.	دمای محیط کمتر ۱۰C در آزمایش قند بوده است.	
لطفاً از اینکه نوار تست را وارد کرده اید مطمئن شوید و تست گیری را اجرا کنید.	این پیام سه بار با صدای بیب ظاهر می شود اگر کلید روشن خاموش را فشار داده و نوار تست TC را داخل دستگاه قرار نداده باشید.	<input type="text"/>